

Anmerkungen zur Anwendung

- Die Erstanpassung der Schienen sollte nur durch fachkundiges Personal erfolgen.



Die Schienen sind nicht steril, sie dürfen nicht auf offene Wunden angelegt werden.

- Vorgeformte Schienen können direkt am verletzten Körperteil angepasst werden. Sollten größere Umformungen notwendig sein, haben diese an einem geeigneten Modell (z. B. Gipsmodell) zu erfolgen.
- Die Schienen dürfen beim Anpassen nicht zugeschnitten werden. Es könnte zu Verletzungen durch scharfe Aluminiumkanten kommen. Die Schienen dürfen nur vorsichtig angedrückt und gebogen werden. Die Schienen können mit geeignetem Befestigungsmaterial (beiliegenden Klettbandern) befestigt werden. Vermehrtes Verformen der Orthese muss - soweit möglich - vermieden werden, da es die Stabilität des Aluminiumkerns vermindern kann.



- **Schienen nicht knicken!**

Anmerkungen zur Pflege

Alle Schienen und Einlagen können mit lauwarmem Wasser und neutraler Seife gereinigt und bei Zimmertemperatur oder mit einem Föhn bei niedriger Temperatureinstellung getrocknet werden.



- **Keine Mikrowelle, Infrarotbestrahlung der Wäschetrockner!**

Sano-Trend Orthoservice GmbH
Nibelungenstraße 10a
D-95444 Bayreuth

T: 0921 15104680
F: 0921 15104684
info@sano-trend.de
www.sano-trend.de